

Dane aktualne na dzień: 19-09-2021 21:08

Link do produktu: <https://sklep.phkonrad.pl/aplikator-do-bolusow-p-452.html>



APLIKATOR DO BOLUSÓW

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

Aplikator specjalnie zaprojektowany do dostarczania: Bolusów

Wykonany ze stali nierdzewnej, łatwy w obsłudze i można go używać nawet jedną ręką.

Instrukcja stosowania:

1. Umieść bolus w aplikatorze.
2. Trzymaj zwierzę z głową wyciągniętą do przodu i szyją prostą.
3. Umieść aplikator w przedniej części jamy ustnej i dociśnij go mocno, ale delikatnie nad grzbietem języka.
4. Podnieś głowę z wyciągniętą szyją, a zwierzę połknie końcówkę aplikatora, co widać po tym, jak aplikator łatwo wsuwa się do gardła.
5. Bolus można następnie wprowadzić, pociągając za spust.
6. Ostrożnie wycofaj aplikator

Nie używaj siły podczas podawania bolusa.

Obserwuj zwierzę przez chwilę, aby upewnić się, że bolus został połknięty.